


Critères de qualification des pasteurisateurs

- _ Une qualification doit être répétée **une fois par an**, et après chaque intervention majeure sur le pasteurisateur
- _ être effectués sur **trois cycles** en charge
- _ les mesures doivent être effectuées par **des sondes indépendantes du pasteurisateur**
- _ à raison *d'une sonde pour 8 à 10 biberons* et réparties de manière régulières dans l'enceinte
- _ Température de plateau **62,5-64,5°C pour chaque sonde**
- _ Temps de plateau (temps à partir duquel toutes les sondes sont à 62,5°C) **30-35mn (sécurité)**
- _ Temps d'exposition supérieur à 58°C **<50mn pour chaque sonde (qualité)**
- _ Descente de **62,5°C à 6°C ≤ 1h** (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine Version consolidée au 08 juin 2006)

Disposition des sondes



Courbes des 9 sondes

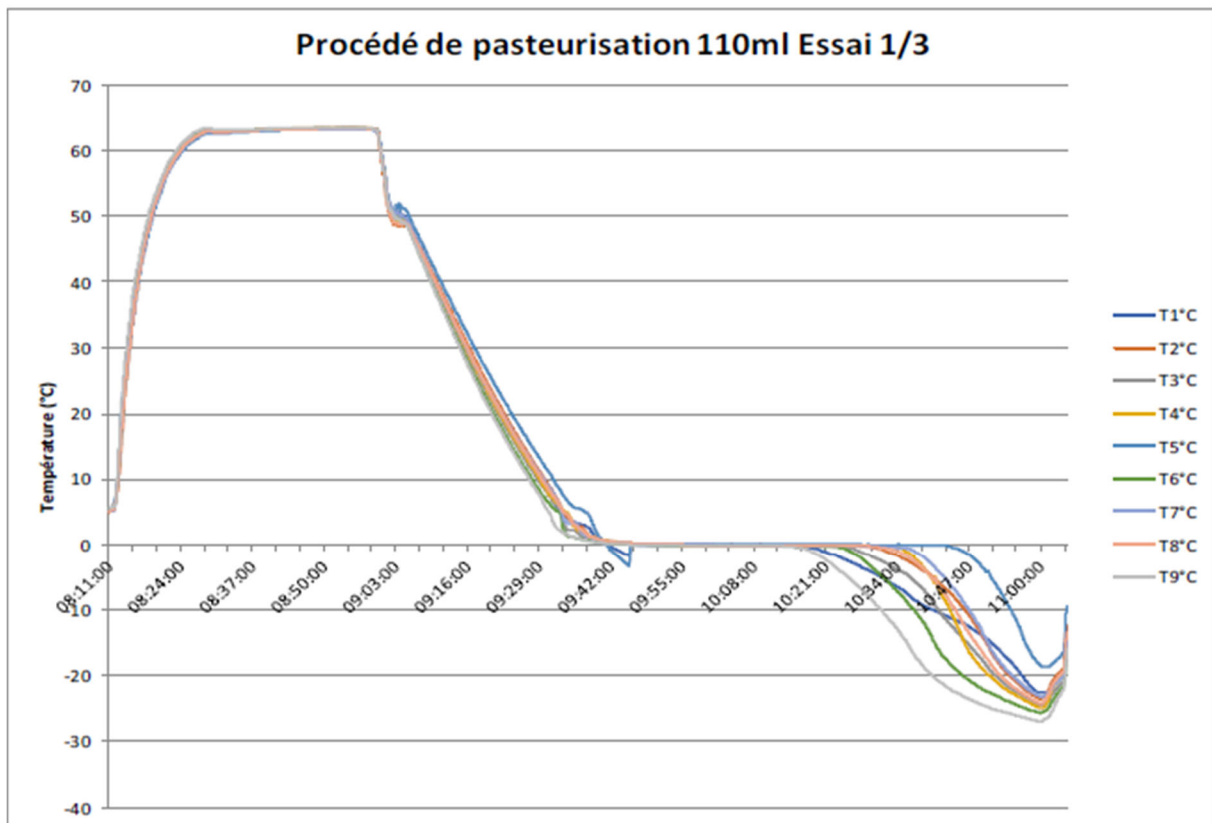

Rapport du logiciel de traçabilité du pasteurisateur (Visutrace)

Établissement: GHT NOVO	Date: 03/03/2025	Résultat: CONFORME	
Équipement: Pasteurisateur 01 (350128)	Cycle No. : 0296	Type cycle: Pasteurisation	

